
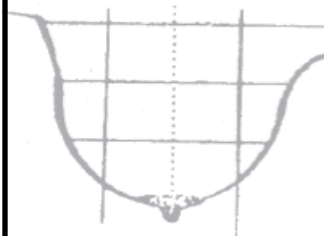
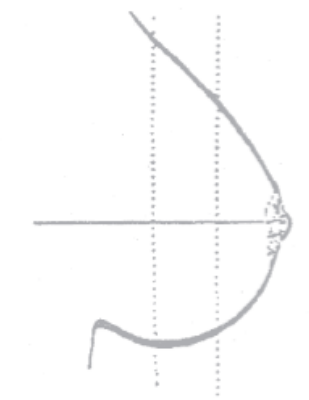


Zweckbestimmung - SPECBOARD kann von Chirurgen, Radiologen und Pathologen als Hilfsmittel zur Lokalisation von verdächtigen Arealen in chirurgischen Präparaten verwendet werden.




RECHTE

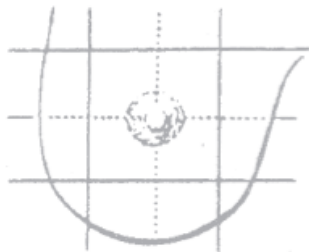

1. Markieren der Lage der Läsion und der Lage des Orientierungsdrahtes in dem Gitterdiagramm auf dem "SPECBOARD".
2. Der Chirurg markiert den medialen und den superioren Rand des Präparates vor der Entnahme des Gewebes aus der Brust.
3. Eine Assistenz hält das geöffnete "SPECBOARD" sodass der Chirurg das Präparat mit dem superioren Rand in der oberen linken Ecke des Gitterdiagrammes platzieren kann.
4. Das "SPECBOARD" wird mit dem wiederverwendbaren Band verschlossen.
5. Das "SPECBOARD" wird in einem Polyethylen-Beutel versiegelt. Danach wird ein Röntgen angefertigt.
6. Die Röntgenaufnahme und das "SPECBOARD" mit dem Operationspräparat wird gemeinsam mit dem radiologischen Befund an den Pathologe geschickt.
7. Der Pathologe nutzt das "SPECBOARD"-Gitterdiagramm im rechten Winkel zu dem Röntgenraster zur Lokalisation der Lage der Läsion im Inneren des chirurgischen Präparates.
8. Das "SPECBOARD" wird nach lokalem Hygieneprotokoll entsorgt.

(Part #142 revision 123115)

LINKEN

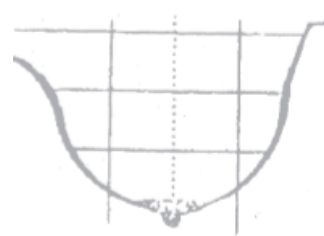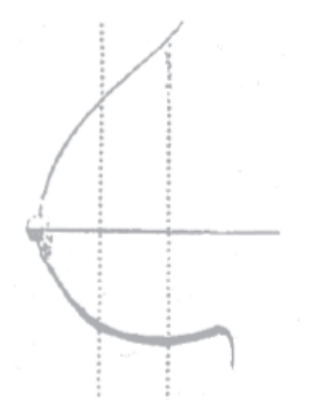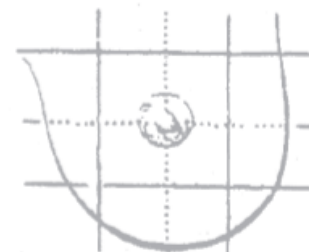



SPECBOARD CE


Specimen Localizer
Koordinatensystem zur Lokalisierung
Système de Localisation Stéréotaxique
Localizador de Espécimen
Localizador de Espécime
Localizzatore per Campioni



LOT 2015-07-15

 2020-07-15

 MacBrud Corporation 14021 SW 143 Court #6 Miami, Florida, USA 33177
Tel +1.305.378.1958 / fax +1.305.378.1954 / www.macbrud.com

Distributed by Medimex GmbH In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg, Germany
 Tel.: +49 6431 7302 300 / Fax: +49 6431 7302 235

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



IVD



REF 777



Das "SPECBOARD" wird nach lokalem
Hygieneprotokoll entsorgt

